

LET OP!

BELANGRIJKE INSTRUCTIES BIJ UW Philips FRx AED

Activeer uw AED direct:

1. Trek de groene plastic strook uit de AED
2. De AED voert nu een zelftest uit
3. Druk **niet** op de groene knop
4. Druk op de oranje toets wanneer dit wordt aangegeven
5. Druk op de groene toets wanneer dit wordt aangegeven (nu wel drukken)
6. De zelftest van de AED duurt ongeveer 1 minuut (tijdens de zelftest zegt de AED regelmatig "testen")
7. Zegt de AED '*klaar voor gebruik*', dan is de zelftest klaar
8. Controleer of het groene lampje (rechtsboven) knippert. Dit lampje knippert elke 4 seconden groen, en laat hiermee zien dat de AED klaar is voor gebruik.
9. Plaats de AED in de draagtas en sluit deze. U ziet het groene lampje door het kijkglas.
10. Indien aanwezig: bevestig de snelle interventie kit met bijgeleverde haak aan de tas