


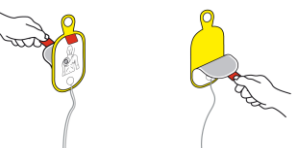







<p>1</p>	<p>Actie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer bewustzijn en ademhaling (max. 10 sec), indien geen ademhaling: Geef de volgende opdrachten aan omstanders: • Bel 112, meld dat de reanimatie is gestart en kom terug om te vertellen dat hulp onderweg is. • Haal de AED <p>Start zelf met reanimeren totdat de AED ter plaatse is. Voer 30 compressies uit, knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem tweemaal vol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaats de AED naast het hoofd van het slachtoffer, aan de kant van de hulpverlener die de AED gaat bedienen. 	
<p>2</p>	<p>Verwijder de kleding van de borst van de patiënt. Maak de huid schoon en droog deze zo nodig af.</p> 	<p>Stop de reanimatie; Werk samen bij het ontbloten van het bovenlichaam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hangt aan de AED een etui? Dan zit daarin o.a.: een grote kledingschaar, een scheermes en een handdoek • Ontbloot het bovenlichaam geheel: <ul style="list-style-type: none"> - Verwijder BH en sieraden - Scheer het borsthaar met het scheermes - Droog de borst (verwijder achtergebleven haar) met handdoek
<p>3</p>	<p>GEDETAILLEERDE AANWIJZINGEN</p> <p>Te starten: Trek aan handvat. Verwijder deksel.</p> 	<p>Hervat de reanimatie, terwijl de 2^e hulpverlener de AED bedient</p> <p>Plaatsen elektroden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trek aan het handvat en verwijder het plastic beschermdeksel door aan de beugel te trekken • Trek de beschermfolie eraf en neem de elektroden uit. • Trek de elektroden één voor één van het gele schutblad. • Breng de elektroden aan precies zoals het plaatje aangeeft. • Plak de elektrode niet op de tepel / piercing sieraden • Plak de elektroden in 1x goed. Niet erop en eraf ...
<p>4</p>	<p>Trek het beschermfolie los en neem de elektroden uit.</p> 	<p>Opmerking: Wacht niet op de stem! Werk je sneller, dan volgt de AED jou!</p> <p>Ondergrond.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vocht of metaal maakt niet uit zolang de elektroden geen water of ondergrond aanraken.
<p>5</p>	<p>Trek de elektroden van de gele kunststof onderlaag.</p> 	<p>Bijzondere omstandigheden;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwonding op plek elektroden: plak de elektroden andersom (rechtsboven & linksonder) & droog bloed zoveel mogelijk voor stroomstoot • Pacemaker: de AED kan gewoon gebruikt worden (let op: indien de AED geen hartanalyse kan maken de elektroden andersom plaatsen (rechtsboven & linksonder) • Zwanger: de AED kan gewoon gebruikt worden • Kinderen onder de 25 kg (ongeveer 6-8 jaar): plaats 1 elektrode op de borst en de andere elektrode tussen de schouderbladen op de rug (zie tekening hiernaast)
<p>6</p>	<p>Breng de elektroden precies zo aan als op de plaatjes.</p> 	
<p>7</p>	<p>Analyse in uitvoering ... Raak de patiënt niet aan!</p> <p>Wacht totdat  stopt met knipperen</p> 	<p>Tijdens de analyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop de reanimatie • Maak de omgeving van het lichaam vrij, zodat niemand de patiënt aanraakt
<p>8</p>	<p>Om een shock toe te dienen: Druk op de knipperende ORANJE schoktoets. Raak de patiënt niet aan.</p> 	<p>Na de stroomstoot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laat de elektroden op het lichaam zitten. De AED controleert automatisch iedere twee minuten de hartfunctie <p>Opmerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 tot 4 schokken is normaal • Verwijder de elektroden niet van het slachtoffer (dit wordt door de hulpdiensten gedaan)
<p>9</p>	<p>Voor hulp bij reanimatie: Druk op knipperende BLAUWE knop.</p> 	<p>Reanimeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start direct na toedienen stroomstoot met reanimeren nadat de AED heeft gezegd: "het is veilig de patiënt aan te raken" • Laat een andere hulpverlener op de blauwe knop drukken • Voer 30 compressies uit, knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem tweemaal vol