

## 1 ACTIE Controleer bewustzijn, indien geen bewustzijn: Geef de volgende opdrachten aan omstanders:


- Bel 112, kom terug om te vertellen dat hulp onderweg is.
- Haal de AED.

Controleer ademhaling (max. 10 seconden).

**Start zelf met reanimeren totdat de AED ter plaatse is.**

- Voer 30 compressies uit, knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem tweemaal.
- Plaats de AED naast het hoofd van het slachtoffer, aan de kant van de hulpverlener die de AED gaat bedienen.
- Zet mobiele telefoon op de luidspreker voor ondersteuning door 112.





## 2 Ontbloot borst. Maak schoon en droog zo nodig af.

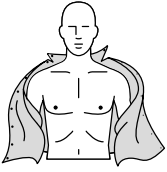


**Stop de reanimatie; Werk samen bij het ontbloten van het bovenlichaam:**

- Hangt aan de AED een etui? Dan zit daarin o.a.: een grote kledingschaar, een scheermes en een handdoek.
- Ontbloot het bovenlichaam geheel
  - Verwijder BH en halsketting
  - Scheer het borsthaar met het scheermes
  - Droog de borst met handdoek

## 3 ZET AAN. Open grijze elektrodedoos. Trek beide elektroden los. Plaats elektroden op borst

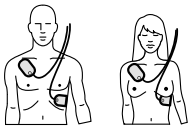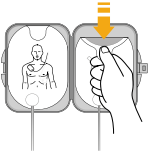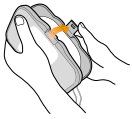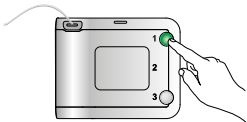

Plaats op rug en borst.

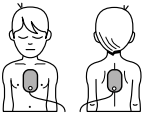

**Hervat de reanimatie, terwijl de 2e hulpverlener de AED bedient.**

**Plaatsen elektroden:**

- Druk op de groene knop. De AED gaat aan.
- Trek de elektroden één voor één uit de grijze cassette.
- Breng de elektroden aan precies zoals het plaatje aangeeft.
- Plak de elektrode niet direct op de tepel, piercing of sieraden.
- Plak de elektroden in 1x goed.

**Opmerking:**

Wacht niet op de stem! Werk je sneller, dan volgt de AED jou!

**Ondergrond:**

- Vocht of metaal maakt niet uit zolang de elektroden geen water of ondergrond aanraken.

**Bijzondere omstandigheden:**

- Verwonding op plek elektroden: plak de elektroden andersom & droog bloed zoveel mogelijk voor plaatsing.
- **Pacemaker:** de AED kan gewoon gebruikt worden (**let op:** indien de AED geen hartanalyse kan maken de elektroden andersom plaatsen).
- **Zwanger:** de AED kan gewoon gebruikt worden.
- Kinderen onder de 25 kg (ongeveer 6-8 jaar): plaats 1 elektrode op de borst en de andere elektrode tussen de schouderbladen op de rug (zie tekening hiernaast).

## 4 Bezig met analyse... houd afstand.


WACHT TOTDAT  STOPT MET KNIPPEN



**Tijdens de analyse:**

- **Stop de reanimatie.**
- Maak de omgeving van het lichaam vrij, zodat niemand de patiënt aanraakt.

## 5 Druk op knipperende oranje schokknop.

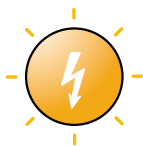


**Na de stroomstoot:**

- Laat de elektroden op het lichaam zitten. De AED controleert automatisch iedere twee minuten de hartfunctie.

**Opmerking:**

- 2 tot 4 schokken is normaal.
- Verwijder de elektroden niet van het slachtoffer (dit wordt door de hulpdiensten gedaan).

## 6 Voor hulp bij reanimatie: druk op knipperende blauwe knop.

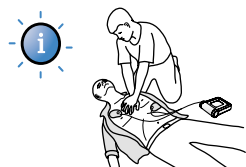

**Reanimeren:**

- Start direct na toedienen van de stroomstoot met reanimeren (nadat de AED heeft gezegd: "het is veilig de patiënt aan te raken").
- Laat een andere hulpverlener op de blauwe knop drukken.
- Voer 30 compressies uit, knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem tweemaal.