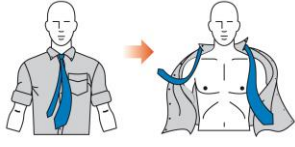


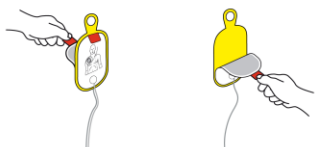
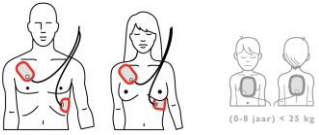


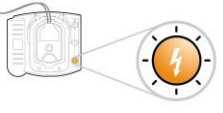



1	<p>Actie</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer bewustzijn en ademhaling (max. 10 sec). Indien geen ademhaling, geef opdrachten aan omstanders: Bel 112, meld dat de reanimatie is gestart en kom terug om te vertellen dat hulp onderweg is. <p>Haal de AED</p> <p>Start zelf met reanimeren totdat de AED ter plaatse is. Voer 30 borstcompressies uit, knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem tweemaal vol</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaats de AED naast het hoofd van het slachtoffer, aan de kant van de hulpverlener die de AED gaat bedienen. 	
2	<p>Verwijder de kleding van de borst van de patiënt. Maak de huid schoon en droog deze zo nodig af.</p> 	<p>Stop de reanimatie. Werk samen bij het ontbloten van het bovenlichaam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hangt aan de AED een etui? Dan vind je hierin o.a. een grote kledingschaar, een scheermes en een handdoek. Ontbloot het bovenlichaam geheel: <ul style="list-style-type: none"> Verwijder beha en sieraden Scheer het borsthaar met het scheermes Droog de borst (verwijder achtergebleven haar) met handdoek
3	<p>GEDETAILLEERDE AANWIJZINGEN</p> <p>Te starten: Trek aan handvat. Verwijder deksel.</p> 	<p>Hervat de reanimatie, terwijl de 2^e hulpverlener de AED bediend.</p> <p>Plaatsen elektroden</p> <ul style="list-style-type: none"> Trek aan het handvat en verwijder het plastic beschermdeksel. Trek de beschermfolie eraf en neem de elektroden uit. Trek de elektroden één voor één van het gele schutblad. Breng de elektroden aan precies zoals de afbeelding aangeeft. Plak de elektrode niet op de tepel of piercing sieraden. Plak de elektroden in 1x goed. Niet erop en eraf ...
4	<p>Trek het beschermfolie los en neem de elektroden uit.</p> 	<p>Opmerking Wacht niet op de stem! Werk je sneller, dan volgt de AED jou!</p> <p>Ondergrond Vocht of metaal maakt niet uit, zolang de elektroden geen water of ondergrond aanraken.</p>
5	<p>Trek de elektroden van de gele kunststof onderlaag.</p> 	<p>Bijzondere omstandigheden</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwonding op plek elektroden: plak de elektroden andersom (rechtsboven & linksonder) en droog bloed zoveel mogelijk voor stroomstoot. Pacemaker: de AED kan gewoon gebruikt worden (let op: indien de AED geen hartanalyse kan maken de elektroden andersom plaatsen (rechtsboven & linksonder). Zwanger: de AED kan gewoon gebruikt worden. Kinderen onder de 25 kg (ongeveer 6-8 jaar): plaats 1 elektrode op de borst en de andere elektrode tussen de schouderbladen op de rug (zie tekening).
6	<p>Breng de elektroden precies zo aan als op de plaatjes.</p> 	
7	<p>Analyse in uitvoering ... Raak de patiënt niet aan!</p> <p>Wacht totdat  stopt met knipperen</p> 	<p>Tijdens de analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> Stop de reanimatie. Maak de omgeving van het lichaam vrij, zodat niemand het slachtoffer aanraakt.
8	<p>Om een shock toe te dienen: Druk op de knipperende ORANJE schoktoets. Raak de patiënt niet aan.</p> 	<p>Na de stroomstoot</p> <ul style="list-style-type: none"> Laat de elektroden op het lichaam zitten. De AED controleert automatisch iedere twee minuten de hartfunctie. <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 tot 4 schokken is normaal Verwijder de elektroden <u>niet</u> van het slachtoffer (dit wordt door de hulpdiensten gedaan)
9	<p>Voor hulp bij reanimatie: Druk op knipperende BLAUWE knop.</p> 	<p>Reanimeren</p> <ul style="list-style-type: none"> Start direct na toedienen stroomstoot met reanimeren nadat de AED heeft gezegd: "Het is veilig de patiënt aan te raken" Laat een andere hulpverlener op de blauwe knop drukken Voer 30 borstcompressies uit, knijp de neus dicht, kantel het hoofd achterover en beadem tweemaal vol.

voer 30 compressies uit • knijp neus dicht, kantel hoofd achterover • beadem tweemaal vol