

Handleiding Philips wandkast

Het activeren van de kast en het alarm.

1. De 9V batterij vind je in een envelop in de witte wandkast
2. Je ziet het zwarte alarmkastje links in de kast
3. Open het zwarte alarmkastje door de bovenkant van het kastje eraf te halen
4. Plaats de 9V batterij in het alarmkastje en sluit deze weer
5. Plak het alarmkastje met het meegeleverde dubbelzijdige tape aan de linker binnenzijde van de wandkast
6. Plaats de sleutel in het daarvoor bestemde sleutelgat
7. Het rode stipje dat op 12 uur zit betekent dat het alarm is uitgeschakeld
8. Het groene stipje dat op 3 uur zit betekent dat het alarm is ingeschakeld.

Deze kast is getest door van ProCardio.