

## Belangrijk!

### De batterij van uw AED is aan vervanging toe!

Geachte heer/mevrouw,

U hebt ervoor gekozen dat wij voor u bijhouden wanneer de batterij van uw HeartStart HS-1 AED vervangen moet worden. Volgens onze gegevens is uw batterij nu aan vervanging toe.

Bij deze brief treft u de nieuwe batterij aan. Om te voorkomen dat uw AED niet bruikbaar is op het moment dat elke seconde telt, hebben wij het volgende advies:

### Vervang de batterij direct!

1. Aan de achterzijde van de AED verwijdert u de batterij.
2. Haal de nieuwe batterij uit de verpakking.
3. Plaats deze in het batterijcompartiment.
4. De AED gaat nu een zelftest uitvoeren.
5. Druk hierbij **niet** op de **groene knop**.
6. Druk op de **oranje knop** wanneer deze knippert.
7. De zelftest van de AED duurt ongeveer 1 minuut.
8. Vervolgens meldt de AED dat hij *'klaar voor gebruik is, in geval van nood druk op de groene aan/uit knop'*. Wacht even af, na enige tijd gaat het groene lampje (rechtsboven de aan/uit knop) knipperen.
9. Doe de AED terug in de rode draagtas, uw AED is weer klaar voor gebruik.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

ProCardio