

Vervang de batterij direct!

Batterij vervangen

1. Aan de achterzijde van de AED verwijder je de oude batterij
2. Haal de nieuwe batterij uit de verpakking
3. Plaats deze in het batterijcompartiment
4. De AED gaat nu een zelftest uitvoeren (duurt ongeveer 1 minuut)
5. Druk niet op de groene knop
6. Druk op de oranje knop wanneer deze knippert
7. De AED meldt dat hij klaar is voor gebruik. In geval van nood kan je op de groene aan/uit knop drukken. Wacht even af, na enige tijd gaat het groene lampje (rechtsboven de aan/uit knop) knipperen
8. Doe de AED terug in de draagtas. Je AED is weer klaar voor gebruik!

Oude batterij inleveren

De oude batterij mag niet in de vuilnisbak worden gegooid. Je kan de batterij inleveren bij één van de verschillende inleverpunten bij jouw in de buurt zoals de supermarkt of een gemeentelijk depot.

HartslagNu updaten (i.v.t.)

Zodra de nieuwe batterij in de AED is geplaatst, is het belangrijk om de vervaldatum aan te passen in je HartslagNu account.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

AED360-ProCardio | Vlierberg 4-5B, 3755 BS Eemnes
info@procardio.nl | 035 – 33 33 515