


## **Vervang de elektrodecassette direct!**

### **Elektrodecassette vervangen**

1. Plug de connector van de oude elektrodecassette los van de AED
2. De AED zal het volgende melden "Steek de connector van de elektrode in"
3. Plug de connector van de nieuwe elektrodecassette aan op de connectorpoort van de AED
4. De AED zal het volgende melden "Connector ingestoken"
5. De AED kan weer terug in de draagtas worden geplaatst.

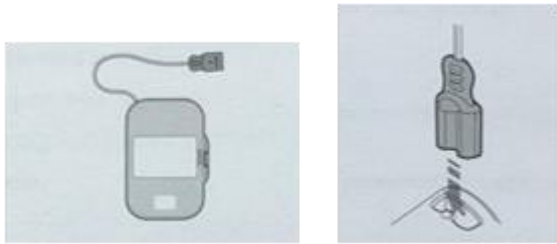

### **Belangrijk**

Waarschuw medegebruikers dat zij nooit zonder geldige reden de gesealde verpakking van de elektrodecassette mogen openen. De elektroden verliezen hierdoor hun kleefkracht. Open de cassette alleen bij een inzet.

### **Oude elektrodecassette weggooien**

De oude elektrodecassette mag alleen bij het Klein Chemisch Afval (KCA) worden weggegooid. Een inleverpunt vind je onder andere bij supermarkten of een gemeentelijk depot.

### **HartslagNu updaten (i.v.t.)**

Is de AED aangemeld bij HartslagNu, dan is het belangrijk om de vervaldatum aan te passen in je account.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

**AED360-ProCardio**  
info@procardio.nl

| Vlierberg 4-5B, 3755 BS Eemnes  
| 035 - 33 33 515